

РĒTĪJUMS AR METODI "GHMS UZ MIKROBU MARĶIERIEM"

"Sausā piliena" metode.
Norādījumi asins paraugu ņemšanai.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ «ГХМС НА МИКРОБНЫЕ МАРКЕРЫ»

Способ «сухая капля».
Инструкция по забору крови.

Sekojet tieši norādījumus šajā rokasgrāmatā, pretējā gadījumā laboratorija negarantē iespēju darīt pētījumus.

Следуйте точно указаниям данной инструкции, в противном случае лаборатория не гарантирует сроки и саму возможность выполнения исследования.

Biomateriāls jāsavāc tukšā dūšā vai pēc 3 stundām vai vēlāk, pēc ēšanas!
Собирать биоматериал нужно натощак или через 3 часа и позже, после еды!

Labdien! Jūs esat saņēmis "sausu pilienu" asins paraugu patstavigi ņemšanas komplektu.

KOMPLEKTĀ IETILPST:

- vienreiz soma ar Zip-Lock
- automātiskā skarifikator
- spirta salvetes
- nosūtīšanas karte

BIOMATERIĀLA SAVAKSANA:

- Parakstiet nosūtīšanas karti. Aizpildiet tukšos laukus.
- Veiciet patstāvīgi kapilāru asiju ņemšanu (no pirksta), izmantojot automātisko skarifikatoru. Automātiskais vienreiz lietojamais skarifikators padara asins savākšanas procedūru praktiski nesāpīgu. Skarifikatora darba gals, kurā adata ir paslēpta, ir aizvērts ar vāciņu, kas ir jāatvieno, atskrūvējot. Nospiediet skarifikatoru ar galu, kurā adata ir paslēpta, un vienreiz nospiediet pogu uz zeltnesis pirksta spilvenu, kas iepriekš tika apstrādāts ar spirta salveti no komplekta. Uzmanību! Jūs varat veikt tikai vienu punkciju, jo adata tiek automātiski bloķēta.
- Panemiet kartes paraugu. Masējot pirkstu no vidusdaļas līdz spilvenam, jūs iegūsīt asiju pilienu, kurā jums 45 grādu leņķi jāiegredē kapilārās sloksnes galu (ar novilktais bultiņām). Lai izvēlētos pētījumam nepieciešamo asiju daudzumu, iemērciet kapilāru sloksni ar 3-4 dalijumiem, ja nepieciešams, turpiniet masēt pirkstu. Nesmērējiet asinīs strēmelītēs! Sloksnei pašai vajadzētu absorbēt asinīs vismaz 4 dalijumos.
- Novietojiet karti uz sāniem un 2 stundas žāvējiet istabas temperatūrā.
- Pēc žāvēšanas aizveriet karti un ievietojiet to māsiņā ar Zip-Lock. Aizveriet slēzni.
- Nogādājiet karti uz:

7. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruņa numuru:

Здравствуйте! Вы получили набор для самостоятельного забора образца крови «сухая капля».

В НАБОР ВХОДИТ:

- пакетик одноразовый с замком Zip-Lock
- автоматический скарификатор
- спиртовые салфетки
- транспортировочная карточка

СБОР БИОМАТЕРИАЛА:

- Подпишите транспортировочную карточку. Заполните пустые поля.
- Произведите самостоятельный забор капиллярной крови (из пальца) с помощью автоматического скарификатора. Автоматический одноразовый скарификатор делает процедуру взятия крови практически безболезненной. Рабочий конец скарификатора, где спрятана игла, закрывается колпачком, который необходимо отсоединить путем откручивания. К подушечке безымянного пальца, предварительно обработанной спиртовой салфеткой из набора прижмите скарификатор концом, где спрятана игла и нажмите один раз на кнопку. Внимание! Сделать можно только один прокол, так как игла автоматически блокируется.
- Возьмите карточку для образцов. Массируя палец от средней части к подушечке получите каплю крови, в которую необходимо погрузить конец капиллярной полоски (с нарисованными стрелочками) под углом в 45 градусов. Для отбора необходимого для исследования количества крови пропитайте капиллярную полоску на 3-4 деления, при необходимости продолжая массировать палец. Размазывать кровь по полоске не следует! Полоска должна сама впитать кровь минимум на 4 деления.
- Поставьте карточку на боковую поверхность и высушите при комнатной температуре в течение 2-х часов.
- После подсушивания, закройте карточку и поместите в пакет с замком Zip-Lock. Замок закройте.
- Доставьте карточку по адресу:

7. Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами по номеру телефона:

